



**1.** Ta försiktigt ur Handispec ur dess förpackning. Testa funktion utanför patienten; låst respektive öppet läge.




**2.** Applicera glidslem på den undre delen.

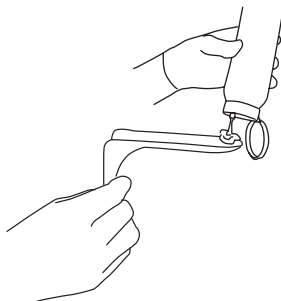


**3.** Greppa Handispec i handtaget med ena handen och vinkla upp till 90 grader. Håll isär blygdläpparna med andra handen och för in Handispec i vagina.

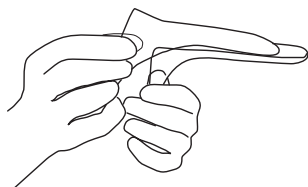

**4.** Vinkla tillbaka till 0 grader och pressa försiktigt ner mot bakre vaginalväggen. För in den övre delen av Handispec.

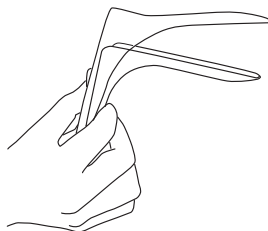

**5.** Öppna Handispec genom att trycka övre delen uppåt och lås i önskat läge, så att bakre och främre vaginalväggen hålls isär för att identifiera portio.

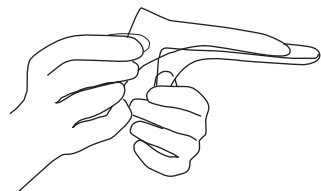

**6.** Vid avslutad undersökning; lossa på låset och stäng Handispec. Ta försiktigt ut övre delen först; vinkla nedre delen upp till 90 grader och ta försiktigt ut det.

Läs användarmanualen	Tillverkningsdag	Återanvänd inte
<b>REF</b> Artikel nummer	Sista förbrukningsdag	Osteril
<b>LOT</b> Lot nummer	Skydda från solljus	Använd inte om förpackningen är skadad.
<b>MD</b> Medicinteknisk produkt	Förvaras torrt	Uppfyller förordning (EU) 2017/745 Parlamentet och rådet av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.
Latexfri		



Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se

40-1351-210823



Wing Plast AB