




Bruksanvisning för 1521, 1522, 1522-L, 1525, 1531

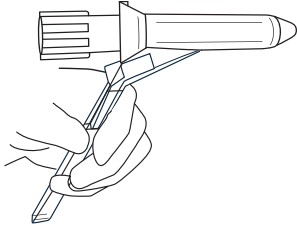


1. Ta försiktigt ur proktoskopet ur dess förpackning. Inspektera proktoskopet så att det ser bra ut och inte har några skador.

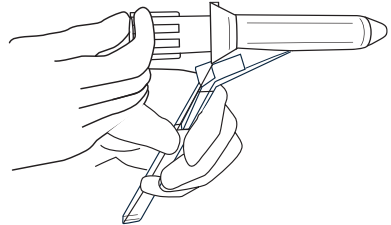


2. Testa först funktion utanför patienten.

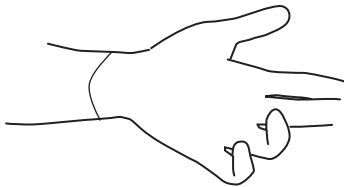


3. Patienten ska ligga på sidan. Undersök analöppningen, analkanalen och nedre delen av ändtarmen med ett finger.

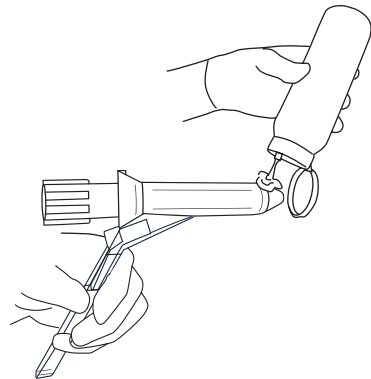

4. Smörj in rör och mandräng med glidegel och för in den i ändtarmen.

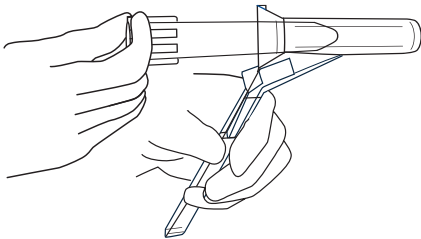

5. Ta ut mandrängen.

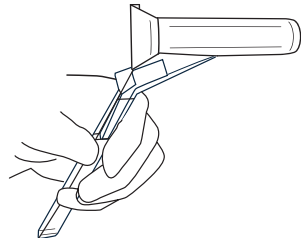


6. Efter avslutat undersökning backa proktoskopet och inspektera ändtarmen under tiden.

Tillbehör för Proktoskop

SE

Ljusadapter engångs 1528B och 1529E

Fiberljusadapter flergångs 1527, 1528, 1528H, 1529

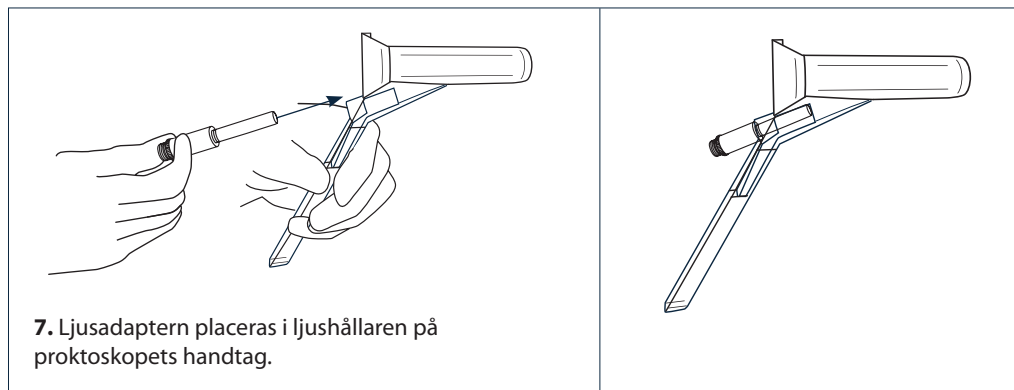

Proktoskop 1521 utan lamphållare

Proktoskop 1522 med lamphållare

Proktoskop 1522-L med ljusadapter

Proktoskop 1524 Large med lamphållare

Proktoskop 1531 Small med lamphållare

Läs användarmanualen	Tillverkningsdag	Återanvänd inte	Medicinteknisk produkt
Artikel nummer	Sista förbrukningsdag	Steril	
Lot nummer	Använd inte om förpackningen är skadad.	Latexfri	
Förvara torr	Luftfuktighet 0-70%	Temp intervall 0 till 30°C	
Skydda från solljus	Uppfyller förordning (EU) 2017/745 Parlamentet och rådet av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.		



40-1521, 1522, 1522-L, 1525, 1531-210611

Quality ISO 9001 Environment ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se



Wing Plast AB