



Cetro Visir Comfort, art.nr. 2020, med skumremsa för ökad komfort för användaren. Storleken justeras enkelt med kardborreband.

Användning



Enklaste metoden för att placera visiret på huvudet är att först hålla skumremsan mot pannan.

Dra sedan kardborrebandet bakom huvudet.

Justera storleken med hjälp av kardborrebandet på höger eller vänster sida på visirets framsida.



Kontrollera att Cetro Visir Comfort sitter korrekt innan arbete påbörjas

Avsedd användning

Produkten är avsedd att användas vid provtagning och arbete med patienter/brukare i hälso- och sjukvården.

CE märkning

Produkten är CE märkt enligt PPE direktivet (EU) 2016/425, Riskkategori 1.

REF: 2020



40-2020-001-200413

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, 0371 330 30, info@wingplast.se, Sweden

