



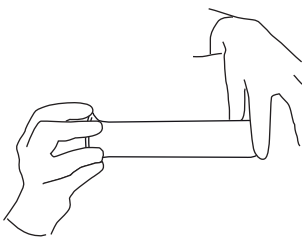
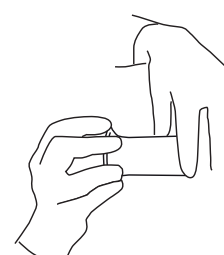


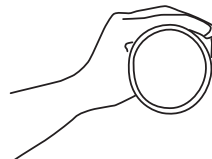

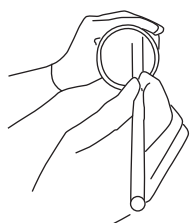


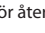


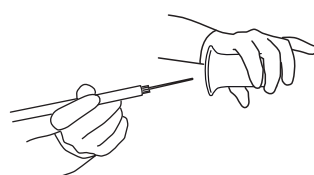

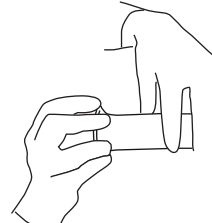










Bruksanvisning för 1340 och 1341

 <p>1. Håll isär labia och för in Rörspecula i vagina samt identifiera cervix.</p>	 <p>2. Vid skalblodprovstagning bör cervix vara dilaterad minst 3 cm. Vid behov använd Roux-hake.</p>	 <p>3. Låt rörspecula ligga tätt mot fosterhuvudet. Undvik fontaneller och ansikte.</p>
 <p>4. Utför undersökningen enligt instruktion för skalpell och provtagning med kapillärrör.</p>	 <p>4. Efter avslutad undersökning, ta försiktigt ut skalpell eller kapillärrör.</p>	 <p>6. Dra försiktigt ut Rörspecula.</p>

 Läs användarmanualen	 Tillverkningsdag	 Återanvänd inte	 Medicinteknisk produkt
 Artikel nummer	 Sista förbrukningsdag	 Får ej steriliseras för återanvändning	 Temp intervall 0 till 30°C
 Lot nummer	 Använd inte om förpackningen är skadad.	 Temp intervall 0 till 30°C	 Steriliserad med etylenoxid.
 Förvara torrt	 Luftfuktighet 0-70%	 Steriliserad med etylenoxid.	 Uppfyller förordning (EU) 2017/745 Parlamentet och rådet av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.
 Skydda från solljus	 Uppfyller förordning (EU) 2017/745 Parlamentet och rådet av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.	 Steriliserad med etylenoxid.	 Uppfyller förordning (EU) 2017/745 Parlamentet och rådet av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.

 REF: 1342 och 1343

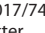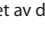40-1340/1341-210826

Quality ISO 9001 Environment ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

 Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se


Wing Plast AB