


Bruksanvisning Tröstnapp prematur


SE

Bruksanvisning för: 37140, 37141

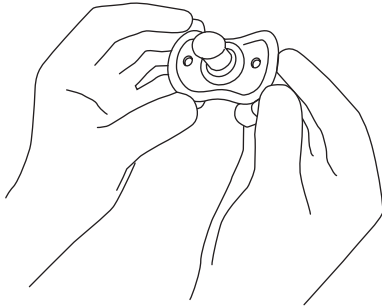





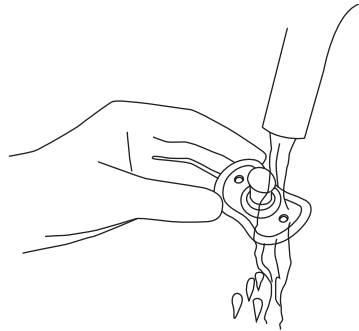

Tröstnappen bör steriliseras i kokande vatten i 5 minuter innan den används första gången.



2. Kontrollera alltid nappen före användning, om sprickor eller skador har uppkommit ska tröstnappen slängas.



1. Rengör nappen innan varje användning under rinnande varmt vatten, utan diskmedel.

 Läs användarmanualen	 Tillverkningsdag	 Återanvänd inte.	 Medicinteknisk produkt
 Artikel nummer	 Sista förbrukningsdag	 Osteril	
 Lot nummer	 Skydda från solljus	 Använd inte om förpackningen är skadad.	
 Förvaras torrt	 Latexfri	 Uppfyller förordning (EU) 2017/745 Parlamentet och rådet av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.	



40-37140, 37141-210810

Quality ISO 9001 Environment ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se

